

Antistatický inhalační nástavec

Trudell Medical International

Popis

Antistatická inhalační pomůcka Aerochamber s Flow-Vu indikátorem dechu. Aerochamber je vytvořen, aby pomohl zlepšit depozici aerosolu s medikací do plic. Pomáhá překonávat koordinační problémy, které mají pacienti při špatném používání samotného aerosolového dávkovače (MDI). Inhalaci lze provádět s maskou (převážně pro děti) nebo pouze s náustkem. Flow-Vu indikátor se pohybuje během inhalace pacienta. Při správném nádechu se indikátor pohne ze své základní polohy směrem k pacientovi. Tím zaručuje správné provádění inhalace.



Určení

Aerochamber je určen pro pacienty, kteří mohou mít potíže při koordinaci a efektivním dávkování aerosolového inhalátoru. Je kompatibilní se všemi typy běžných aerosolových dávkovačů (MDI).

Výhody

- indikátor dechu Flow-Vu
- zvuková signalizace rychlosti nádechu
- antistatická komora pro spolehlivé dávkování
- malý, lehký a praktický
- vhodný pro děti i dospělé

<p>Před prvním použitím výrobek pečlivě prozkoumejte, zda neobsahuje cizí předměty. Pokud si všimnete vad či poškození, výrobek vraťte.</p>	<p>Odstraňte ochranný kryt z MDI dávkovače a Aerochamberu.</p>	<p>Bezprostředně před použitím protřeptejte MDI dávkovač dle návodu k použití.</p>	<p>Vložte MDI dávkovač do gumového otvoru na konci Aerochamberu.</p>	<p>Masku přitiskněte okolo úst a nosu. Při použití náustku jej vložte do úst a stiskněte rty okolo. Dojde k omezení úniku látky v koutcích, a tím zajištění efektivního dávkování. Ke správnému provádění inhalace napomáhá Flow-Vu indikátor, který se pohybuje při nádechu směrem k pacientovi.</p>	<p>Lehce vydechněte a stiskněte MDI dávkovač. Sledujte Flow-Vu indikátor pro minimalizování úniku v koutcích. Nadechněte se ústy pomalu ale hluboce do plného nádechu. Zadržte dech na 5 – 10 sekund. Opakujte 2 – 3 krát po stlačení MDI dávkovače. Mezi nádechy stále držte stisknuté rty okolo náustku. Při příliš rychlém vdechování uslyšíte zvuk píšťaly – dýchejte pomaleji.</p>	<p>Postupujte v inhalaci dle instrukcí MDI dávkovače a doporučení lékaře. Opakujte kroky 3 – 6.</p>

Popis postupu inhalace

Technická data

rozměry (v x š)

154 mm x 40 mm

hmotnost

45 g



Typy produktů

Objednací kód

Kód VZP

AeroChamber Plus s náustkem	10151958050	5008686
AeroChamber Plus s maskou pro kojence	10152158080	5008671
AeroChamber Plus s maskou pro děti 1–5 let	10152058080	5008695
AeroChamber Plus s maskou pro dospělé	10152258050	5008701



0 - 18 měsíců



1 - 5 let



> 5 let

VÝDECHOVÝ VENTIL

- směřuje vydechovanou látku od obličeje a očí pacienta

FLOW-VU INDIKÁTOR

- pro efektivní inhalaci

ZAROVNÁVACÍ DÍL

- pro správnou pozici držení při inalaci




MR Diagnostic s. r. o.

Pod Višňovkou 1662/21
140 00 Praha 4
Česká republika

info@mr-diagnostic.cz
+420 245 005 648

Račianska 72
831 02 Bratislava 3
Slovenská republika

info@mr-diagnostic.cz
+421 (0)2 20 633 367

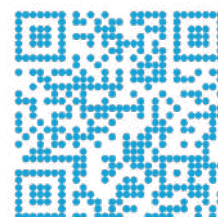

www.mr-diagnostic.cz